

Bad Aiblinger Moorkissen - Anwendung



Moorkissen UNIVERSAL
22 x 18 cm / PZN 4431352



Moorkissen RÜCKEN
38 x 25 cm / PZN 4431369



Moorkissen HALS/NACKEN
53 x 18 cm / PZN 4431375

Achtung:

Moorkissen nicht im Topf aufkochen und nicht im Herd erwärmen. Die Erwärmung in der Mikrowelle reduziert ebenfalls die Lebensdauer der Folie.

Bei richtigem Gebrauch, kann das Moorkissen, aufgrund der Haltbarkeit der Folie, ca. 2 Jahre verwendet werden!

Alpenländisches Kräuterhaus, 83052 Bruckmühl:

- In unseren Produktionsstätten werden vorzugsweise pflanzliche Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau verwendet.
- Für jedes Präparat können wir jederzeit den Nachweis vom Anbau bis zum Endprodukt erbringen.
- Wir unterstützen den Artenerhalt über gezielte Vereinbarungen mit Vertragsbauern.
- Unsere Produktionsstätten wurden bereits 1996 erstmalig mit dem EG-Öko-Audit für praktizierten Umweltschutz ausgezeichnet.



Wussten Sie, dass ...

- ▶ die verbliebenen intakten Moore in Deutschland unter Naturschutz stehen?
- ▶ das Moor aufgrund seiner natürlichen Wirkweise auch bei Kindern unbedenklich eingesetzt werden kann?
- ▶ in Deutschland ungefähr 10 Millionen Kubikmeter Torf abgebaut werden, davon der größte Teil jedoch für den Gartenbau verarbeitet wird?
- ▶ Anfang des 19. Jhdts. eine Moorbadkur in Adelskreisen sehr beliebt war und auch Kaiserin Sissi und Zar Alexander sich zur Kur einfanden?
- ▶ durch regelmäßige Mooranwendung bei rheumatischen Beschwerden die Schmerzen gelindert werden?
- ▶ Moorbäder die Selbstheilungskräfte des Körpers anregen können?
- ▶ in Bad Aibling seit 1838 Moorheilbäder zubereitet werden?
- ▶ nach dem Torfstechen das Moor von größeren Pflanzenteilen befreit wird und je nach Konsistenz Wasser zugesetzt wird, um das Moor für Packungen und Moorbäder aufzubereiten?
- ▶ es schon vor 400 Millionen Jahren Moore gab? Alle heute erhaltenen Moore haben sich jedoch erst im Verlauf der Spät- und Nacheiszeit, also vor etwa 12.000 Jahren gebildet.
- ▶ das Wasser der Hochmoore nährstoffarm ist und einen sehr niedrigen pH-Wert hat?
- ▶ die typische Moorlandschaft von Birken, Sonnentau, Torfmoos und Rohrkolben geprägt ist und Lebensraum für niedrigere Tierarten und Insekten bietet, wie z.B. seltene Libellenarten, Spinnen, Birkhühner und Kreuzottern?



Der Wurzelsepp Kräutertipp

Bad Aiblinger Moorkissen

Moor unterstützt die Behandlung bei:

- Muskelverspannungen
- Gelenkschmerzen
- Rückenschmerzen



Alpenländisches Kräuterhaus GmbH & Co. KG
Otto-von-Steinbeis-Str. 16 · 83052 Bruckmühl
www.wurzelsepp.de

Altes Moor - Neu entdeckt ...

Moor - ein alter Naturrohstoff mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten dringt in den letzten Jahren wieder verstärkt in das Bewußtsein der Menschen ein. Heute gibt es leider nur noch wenige naturbelassene und ökologisch gesunde Moore.

Rund um Bad Aibling jedoch, dem ältesten Moorheilbad

Bayerns, befindet sich eines der größten und gesund wachsenden Hochmoorgebiete in Deutschland.

Hier wird aus den unteren schwarz-braunen Schichten der für medizinische Zwecke wertvolle Schwarztorf gestochen, welcher umgangssprachlich als Moor bezeichnet wird.

Qualität beim Moor ...



Der Schwarztorf der Hochmoore hat sich zum größten Teil aus ehemals organischen Substanzen, wie z.B. Pflanzen, entwickelt und ist therapeutisch wirksamer als Weißtorf.

Das bekannte „Bad Aiblinger Hochmoor“ wird regelmäßig untersucht. Die balneologische Mooranalyse gibt jedem Anwender Aufschluss über die Qualität des wertvollen Naturrohstoffes.



Die Moorinhaltsstoffe weisen eine antibakterielle, antivirale und entzündungshemmende Wirkung auf. Insgesamt betrachtet hat Moor eine physikalische, biochemische und thermische Wirkung.

Auch für das Bad Aiblinger Moorbad wird der medizinisch wertvolle Schwarztorf verwendet. Er ist bekannt für seine hervorragenden thermischen Eigenschaften. Die gesunden Inhaltsstoffe kommen besonders im Moorbad zur Anwendung.



Aus dem Wurzelsepp-Kräuterbuch

Seit ca. 200 Jahren wird Naturmoor medizinisch angewendet. Vor allem in den letzten 70 Jahren wurden die positiven Eigenschaften des Moors im Kurbereich und in der medizinisch-therapeutischen Anwendung erforscht. Dabei zeigte sich in den letzten 20 Jahren, dass das Moor auch in anderen medizinischen Bereichen, wie z.B. der Inneren Medizin, Urologie und Dermatologie, aufgrund der interessanten Wirkstoffe seine Verwendung findet.

Bad Aiblinger Moorkissen - Medizinprodukt zur Unterstützung der Behandlung bei:

Medizinischer Bereich	Therapeutische Anwendung
Orthopädie	<i>Warm:</i> Wirbelsäulen-, Hüft- und Schultererkrankungen, Verspannungen, Hexenschuss, Rückenschmerzen, Ischias, degenerative Gelenkerkrankungen (Arthrose), Weichteilrheumatismus, rheumatische Beschwerden, Osteoporose. <i>Kalt:</i> Prellungen, Verstauchungen, Quetschungen, akut entzündliche Gelenkprozesse
Innere Medizin	<i>Warm:</i> Magen- und Nierenschmerzen
Gynäkologie	<i>Warm:</i> Monatsbeschwerden
Urologie	<i>Warm:</i> Prostata-Beschwerden
Allgemeine Medizin	<i>Warm:</i> Erkältungskrankheiten <i>Kalt:</i> Kopfschmerzen, Insektenstiche, Zahnschmerzen

Für die Moorkissen gibt es eine Konformitätserklärung für Medizinprodukte nach Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Besonders angenehm ist die Spezial-Weichfolie des Moorkissens, die nach EN71/Teil 3 physiologisch unbedenklich und frei von Schwermetallen und anderen gesundheitsgefährdenden Stoffen ist. Es handelt sich um eine dünne, dichte, hygienische und hautfreundliche Folie, die für die Wärme- und Kältetherapie geeignet ist.

Moor tut gut ...

Am bekanntesten ist wohl die Verwendung des Moores in der klassischen Wärme- bzw. Kälteeinwirkung.

In der Wärmetherapie werden unterschiedlichste, meist chronische Erkrankungen der Gelenke, Wirbel und inneren Organe durch Wärmezufuhr behandelt. Moor zeichnet sich durch seine hervorragenden thermischen Eigenschaften aus. So kann Naturmoor - im Gegensatz zu Wasser, Thermogel oder Fango - Wärme langfristig speichern und kontinuierlich abgeben. Dadurch werden auch tiefer gelegene Organe erreicht. Die Haut wird besser durchblutet, der Stoffwechsel angekurbelt und die Zellen besser mit Sauerstoff versorgt.



In der Kältetherapie werden meist akute Entzündungen behandelt. Auch hier eignet sich Naturmoor (im Gegensatz zu Eispackungen) aufgrund seiner thermischen Eigenschaft, Kälte zu speichern und gleichmäßig langfristig abzugeben. So dringt die Kälte tief in die betroffenen Stellen ein. Damit soll eine entzündungshemmende, abschwellende und schmerzlindernde Wirkung, z.B. bei Prellungen oder Verstauchungen, erzielt werden.



*Unser Tipp:
Wurzelsepp Bad Aiblinger Moorkissen
erhalten Sie überall im Fachhandel -
Drogisten, Sanitätshäuser, Apotheken*